

# Textilní ochranná rouška.

Vyrobeno ze 100% bavlny.

## Návod k použití.

1. Před nasazením roušky použijte dezinfekci rukou na bázi alkoholu, nebo si umyjte ruce mýdlem.
2. Volně stahovatelné tkaničky patří dolů a umožňují stažení masky ve spodní části.
3. Rouškou si zakryjte nos a ústa, ujistěte se, že mezi rouškou a obličejem jsou minimální mezery.
4. Během nošení se roušky nedotýkejte.
5. Jakmile je rouška vlhká, vyměňte ji za novou.
6. Roušku sundávejte vždy zezadu za tkaničky

## Údržba.

Všechny použité materiály umožňují opakované použití při dodržení následujících podmínek.

1. Použitou roušku perte na max. 90 °C
2. Přežehlete na nejvyšší stupeň, nebo sterilizujte.
3. Před prvním vypráním doporučujeme na koncích tkaniček udělat suký. Zabráníte tím roztřepování tkaniček při opakovaném praní.

## Likvidace.

1. Vyřazené roušky likvidujte v souladu s místními předpisy.

## Prohlášení výrobce.

1. Masky slouží jako prostředek, který snižuje riziko přenosu virů. Použitý materiál je schopný filtrovat přibližně 50% částic velikosti 0,2 mikronu.
2. Výrobce negarantuje 100% ochranu před virem, ale maska může zastavit jemné kapénky ze slin, pomocí nichž se vir šíří.